



Manuel de l'utilisateur

Bienvenue dans la famille Adapt Solutions!

Nous vous remercions d'avoir choisi le LINK d'Adapt Solutions. Nous sommes fiers de vous compter parmi la grande famille d'Adapt Solutions.

Comme nos valeurs sont basées sur l'**excellence**, l'**innovation**, la **coopération**, la **fierté** et la **bienveillance**, chacun de nos produits est conçu pour respecter notre engagement envers la **sécurité**, la **fiabilité** et la **facilité d'utilisation**. Le LINK a été conçu pour augmenter votre mobilité et votre indépendance et nous le soutenons avec le même dévouement qui guide notre entreprise depuis sa création.

Ce manuel contient des informations importantes en matière d'opération, de sécurité à prendre et de maintenance de votre nouveau LINK. Avec l'entretien et l'usage approprié, votre LINK vous servira durant de nombreuses années.

Nous apprécions votre confiance envers Adapt Solutions et nous souhaitons que votre LINK vous apporte une plus grande liberté et confiance dans votre quotidien.

Bien à vous,

L'équipe Adapt Solutions

TABLE DES MATIÈRES

AVIS ET AVERTISSEMENTS

Avertissements.....	1
Avertissements sonores du LINK.....	3

GUIDE DE L'UTILISATEUR (Télécommande)

Télécommande Référence lumière D.E.L.....	4
LINK Fonction.....	5
LINK Ajustement du siège.....	6
Entrer dans le véhicule.....	7
Sortir du véhicule.....	8

AUTRES FONCTIONS

Fonction Lift Up.....	9
-----------------------	---

DÉPLACEMENT MANUEL

Déplacement manuel.....	10
Localisation du moteur.....	11
Outils de déplacement.....	12
Processus.....	13
Fonction Lift Up.....	15

GARANTIE

Entretien recommandé.....	17
Garantie limitée de 3 ans.....	18
Pour obtenir des pièces garanties ou un remboursement.....	20
Enregistrement de la garantie.....	22



AVIS ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'appareil et/ou le véhicule.



CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE

350 lbs (159 kg)



COMPOSANTES EN MOUVEMENT: RISQUE DE PINCEMENT ET D'ÉCRASEMENT

Le LINK est une base de siège pivotante et abaissable. Il se déplace vers l'intérieur et l'extérieur du véhicule, pivote et s'abaisse vers le sol pour faciliter les transferts.

Pour assurer un usage sécuritaire:

- Gardez les mains, les doigts, les membres et les objets mobiles à l'écart des pièces en mouvement pendant le fonctionnement.
- Ne laissez jamais des personnes ou des animaux domestiques se tenir debout, s'asseoir ou se déplacer derrière, sous ou à proximité du LINK lorsqu'il est en mouvement, qu'il soit occupé ou non.
- Le LINK est conçu et testé pour être utilisé par une seule personne assise. Il ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes ou lorsque quelqu'un est assis sur les genoux de l'utilisateur. Tout poids supplémentaire ou toute interférence peut compromettre la sécurité et endommager l'appareil.



AVERTISSEMENTS SONORES

Pour plus de détails sur chaque avertissement sonore que vous pouvez entendre, veuillez vous reporter à la page 3. Les avertissements sonores constituent une fonction de sécurité importante et **ne doivent jamais être ignorés**, car ils peuvent indiquer une anomalie, un dommage ou un état de fonctionnement dangereux de l'appareil.



RAPPEL IMPORTANT


Placez tous les autocollants de sécurité fournis à l'intérieur du véhicule, dans un endroit visible, afin de rappeler ces mesures de sécurité aux utilisateurs et aux soignants.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER LES BLESSURES ET LES DOMMAGES

- Ne marchez pas sur la base ou le couvercle du LINK lorsque le siège est en mouvement.
- Ne pas incliner le dossier du siège pendant que le LINK est en marche.
- Rangez tous vos effets personnels, câbles ou accessoires loin du LINK. Les objets non fixés peuvent s'emmêler dans le mécanisme, ce qui peut endommager l'appareil ou présenter un risque de blessure.
- N'utilisez le LINK que lorsque le véhicule est garé sur une surface plane et horizontale. Veillez à laisser suffisamment d'espace libre autour du siège et de la porte.
 - Engagez le frein à main si le véhicule est équipé d'une transmission manuelle.
 - Veillez à ce qu'il n'y ait aucun contact avec le sol ou les objets environnants pendant que le LINK tourne ou s'abaisse.
- Avant d'entrer ou de sortir du véhicule à l'aide du LINK :
 - Assurez-vous que votre tête, vos bras et vos jambes ne touchent pas le cadre de la porte et la structure intérieure du véhicule.
 - L'utilisateur peut relâcher le bouton de commande à tout moment pour arrêter le mouvement et ajuster le positionnement si nécessaire.
- N'utilisez jamais le LINK s'il présente des dommages visibles. Contactez votre fournisseur pour une inspection complète avant de continuer à l'utiliser.
- Ne laissez personne s'asseoir directement derrière le siège LINK et/ou le toucher lorsqu'il est occupé et en mouvement.
- Portez toujours la ceinture de sécurité et réglez correctement l'appuie-tête avant de conduire.
- Ne conduisez pas avec le siège trop incliné, car cela pourrait réduire l'efficacité de la ceinture de sécurité et augmenter le risque de blessure en cas de collision.
- N'installez pas de sièges pour enfants dos à la route sur les sièges avant.

AVERTISSEMENTS SONORES DU LINK

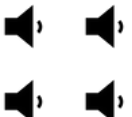Sonore: Quantité et tonalité		Signification	Description
BEE-BEE-BEEP		Connexion d'alimentation 12 V	Mise sous tension de l'unité après une perte de 12 V. *CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR
BEEEEEEEEEEP		Protection de surcharge	Le mécanisme de protection contre les surcharges est activé. *CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR
BEE-BOO-BEE- BOO-BEE-BOO		Surcharge moteur	Problème d'alimentation concernant l'un des moteurs de votre LINK. *CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR
BEEP-BEEEEEEP		Obstruction du pivot	Vérifiez qu'aucun objet appartenant à un passager ou à un passager n'obstrue le mécanisme. Interdisez toute utilisation supplémentaire si vous soupçonnez un dommage et exigez une inspection professionnelle avant de reprendre l'utilisation. *CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR
BEEEP-BEEEP- BEEEP		Rappel d'entretien	Votre entretien annuel est dû. (voir page 17) *CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR
BEEP-BEEP- BEEP-BEEP		Erreur	Erreur concernant un composant de votre LINK. *CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR

***Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir un diagnostic complet, une assistance et un entretien.**

TÉLÉCOMMANDE



LUMIÈRE D.E.I DE LA TÉLÉCOMMANDE

RÉFÉRENCE



● BLEU: Normal. Prêt à être utilisé.

● JAUNE: Mode économie d'énergie (voir plus bas).

● ROUGE: Problème détecté. Ne pas utiliser le LINK. **Contacte ton fournisseur**

● VERT: Aucune réponse ou panne d'alimentation 12 volts. **Contacte ton fournisseur**

● BLEU/ROUGE: L'entretien annuel est dû. (voir page 17) **Contacte ton fournisseur**

Regardez la
courte vidéo en
scannant ici :



JAUNE: MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si la batterie du véhicule (12 V) est déconnectée ou complètement déchargée, le LINK passe en **mode économie d'énergie** afin d'éviter tout dommage au véhicule et à lui-même.

COMMENT SORTIR DU MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE?

Le LINK doit effectuer un cycle complet. Profitez de ce moment pour inspecter visuellement chaque mouvement. **REMARQUE** : il est possible que le LINK s'arrête au cours de son cycle, car il fonctionne à puissance réduite. Vérifiez visuellement que rien n'entrave les mouvements, puis appuyez simplement à nouveau sur le bouton **IN** ou **OUT** pour poursuivre le cycle.

LINK FONCTIONS

Le LINK est une base de siège pivotante et abaissable qui utilise le siège d'origine de votre véhicule, vous offrant ainsi confort et liberté. Les fonctions conviviales du LINK le rendent très facile à utiliser.

ALIMENTATION (POWER)

Utilisez le bouton POWER situé sur le dessus de la télécommande pour l'activer. Un voyant bleu s'allume pour indiquer que la télécommande est active et vous permet d'utiliser votre LINK. Ce voyant clignote lorsque vous bougez. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant dix (10) secondes, le voyant s'éteint et la télécommande n'est plus active. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton POWER situé sur le dessus de la télécommande pour l'activer.

ROTATION INTERNE (IN)

Utilisez ce bouton pour rentrer le LINK dans le véhicule.



ATTENTION

Ne placez pas la télécommande dans la pochette de la porte, car cela pourrait l'endommager! Placez-la uniquement sur l'aimant installé par votre fournisseur.


ROTATION EXTERNE (OUT)

Utilisez ce bouton pour sortir le LINK du véhicule.

Regardez la courte vidéo en scannant ici :



LINK AJUSTEMENT DU SIÈGE

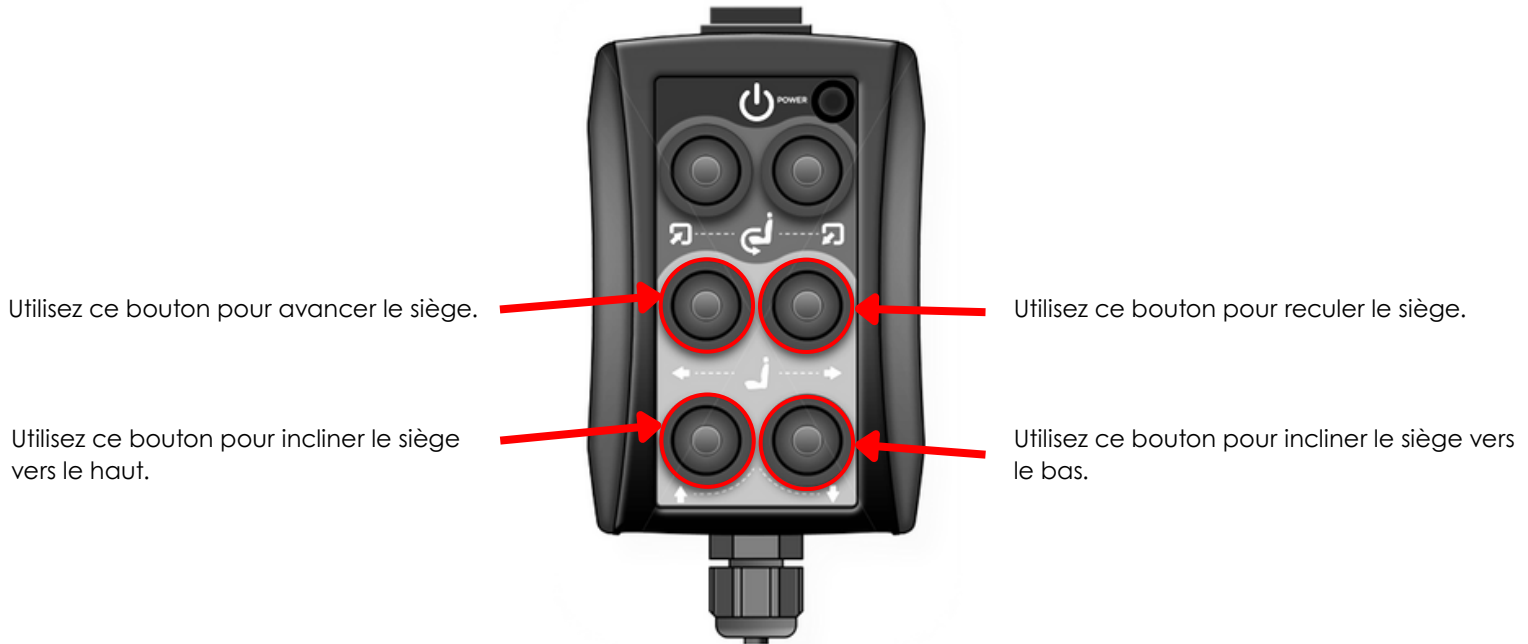

REMARQUE : Les réglages du siège ne seront disponibles qu'une fois que le LINK sera complètement à l'intérieur du véhicule et que le cycle du LINK sera terminé. Si vous avez appuyé sur le bouton POWER, que le voyant bleu est allumé et que les boutons de réglage du siège ne fonctionnent pas, assurez-vous que le LINK a terminé son cycle complet de rotation et qu'il est complètement « IN ». Utilisez le bouton IN jusqu'à ce que le LINK et le siège ne bougent plus pour vous assurer que le cycle est terminé.

ENTRER DANS LE VÉHICULE (Télécommande)

Suivez les étapes ci-dessous:

- Après avoir ouvert la porte du véhicule, récupérez la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le dessus de la télécommande pour l'activer. Le voyant situé dans le coin supérieur deviendra bleu. Ce voyant clignotera lors des mouvements. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant dix (10) secondes, le voyant s'éteindra et la télécommande ne sera plus active. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton POWER situé sur le dessus de la télécommande pour l'activer.
- Appuyez sur le bouton OUT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le LINK ait atteint la hauteur souhaitée pour votre transfert.
 - Une fois que vous êtes confortablement installé sur le LINK, appuyez sur le bouton **IN** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le LINK ait terminé son cycle et se trouve à l'intérieur du véhicule. À tout moment pendant les mouvements, vous pouvez relâcher le bouton et le LINK s'arrêtera, vous permettant de vous repositionner. Une fois que vous êtes prêt à continuer, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **IN** et de le maintenir enfoncé pour reprendre votre ascension dans le véhicule.
- Fermez la porte de votre véhicule et replacez la télécommande à l'endroit indiquée.
- Suivez les étapes décrites à la **page 6** pour régler votre position assise afin d'obtenir un espace suffisant pour les jambes, un positionnement adéquat et un confort optimal à l'intérieur de votre véhicule.

IMPORTANT : Transférez-vous sur le LINK avec un mouvement fluide et contrôlé. Cela permet d'assurer une transition sûre et confortable de votre fauteuil roulant au siège.

SORTIR DU VÉHICULE (Télécommande)

Suivez les étapes ci-dessous:

- Commencez par détacher votre ceinture de sécurité et ouvrez la portière du véhicule.
- Localisez la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le dessus de la télécommande pour l'activer. Le voyant situé dans le coin supérieur deviendra bleu. Ce voyant clignotera pendant les mouvements. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant **dix (10) secondes**, le voyant s'éteindra et la télécommande ne sera plus active. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton POWER situé sur le dessus de la télécommande pour l'activer.
- Appuyez sur le bouton **OUT** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le LINK ait atteint la hauteur souhaitée pour votre transfert. À tout moment, vous pouvez relâcher le bouton et le LINK s'arrêtera de bouger, vous permettant de vous repositionner. Une fois que vous êtes prêt à continuer, appuyez simplement sur le bouton **OUT** et maintenez-le enfoncé pour reprendre votre descente hors du véhicule.
- Une fois que vous vous êtes transféré hors du siège, appuyez sur le bouton **IN** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le LINK soit complètement rentré à l'intérieur du véhicule.
- Remplacez la télécommande et fermez la porte de votre véhicule.



NE JAMAIS ESSAYER D'UTILISER LE LINK LORSQUE LA PORTE DU VÉHICULE EST FERMÉE OU SI LE VÉHICULE EST EN MOUVEMENT.



AUTRES FONCTIONS

LINK FONCTION LIFT UP

Le système LINK peut être équipé d'une fonction **LIFT UP**.

Cette fonction innovante vous offre la possibilité d'utiliser le LINK pour vous aider à vous lever une fois que vous êtes sorti du véhicule. Elle peut également faciliter le transfert vers le LINK, en ajustant l'angle d'inclinaison du siège en fonction de vos besoins.

Cette fonction est intégrée à la programmation du LINK par votre fournisseur de services de mobilité, auprès duquel vous avez acheté le LINK. Assurez-vous de bien comprendre en quoi cette fonction peut vous être utile. Si vous utilisez le LINK uniquement pour vous transférer à niveau, votre fournisseur de services de mobilité omettra simplement cette option dans la programmation de votre LINK.

Cette fonction **ne peut être ajoutée ou modifiée** par vous-même.

Elle est uniquement disponible auprès d'un fournisseur de services de mobilité certifié Adapt Solutions.





DÉPLACEMENT MANUEL

DÉPLACEMENT MANUEL

Votre nouveau LINK est équipé d'un système de déplacement manuel. En cas de panne de courant ou de tout autre problème de fonctionnement, ce système de secours vous permettra de ramener votre siège à l'intérieur de votre véhicule.

⚠ IMPORTANT: Cette fonction ne doit jamais être utilisée lorsqu'un passager est assis sur l'unité et elle requiert un effort physique de la part de l'utilisateur.

Veuillez consulter les pages suivantes pour connaître les étapes à suivre ainsi que les détails sur l'utilisation de cette fonction. Pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation du système de déplacement manuel, une courte vidéo est disponible en scannant le code QR ci-dessous.



Veuillez contacter votre fournisseur de service afin d'effectuer les réparations nécessaires avant d'utiliser votre LINK à nouveau.

Si votre LINK ne fonctionne pas et que le siège se trouve à l'extérieur du véhicule, veuillez suivre les étapes décrites dans les pages suivantes afin de ramener manuellement le siège à l'intérieur du véhicule. (Remarque : si votre LINK est équipé de la fonction LIFT UP, deux étapes supplémentaires doivent d'abord être effectuées. Celles-ci se trouvent à la page 15.)

DÉPLACEMENT MANUEL (Localisation du moteur)

Assurez-vous que le véhicule est toujours en marche.

Retirez la garniture en plastique portant l'inscription LINK, située tout à l'avant de l'unité. Elle est simplement fixée à l'aide de bandes Velcro de chaque côté. (Remarque: la garniture située en dessous n'a pas besoin d'être retirée.)



Il y a quatre trous sous la garniture, à l'avant de l'unité. Les deux trous extérieurs actionnent le moteur TRAVEL, et les deux trous intérieurs actionnent le moteur TILT.

Le troisième moteur, le PIVOT, se trouve à l'arrière du LINK.

(Illustré tout à droite: l'outil de secours a été conçu avec une courbure pour le moteur PIVOT, au cas où votre véhicule serait équipé d'une console centrale.)



Moteur TILT

Tourner dans le sens antihoraire

Moteur TRAVEL

Tourner dans le sens horaire



DÉPLACEMENT MANUEL (Outils)



Pour déplacer ces moteurs manuellement, des outils de secours vous ont été fournis. Ils se trouvent dans un étui, à côté de ce manuel d'utilisation. Les pièces ci-dessous doivent être assemblées comme suit :

1. Assemblez l'outil en insérant l'**adaptateur d'alimentation**, puis en connectant le **câble** fourni à l'extrémité de l'outil. Branchez ensuite l'ensemble à la **prise d'alimentation** du véhicule.
2. Si votre véhicule ne dispose pas d'une **prise d'alimentation auxiliaire**, vous pouvez suivre les étapes supplémentaires suivantes:
 - Insérez l'adaptateur de câble dans votre premier câble.
 - Connectez ensuite le câble muni de l'adaptateur à la batterie de votre véhicule à l'aide des pinces, de la même façon que pour "booster" une batterie.
3. Prenez l'**embout hexagonal** et insérez-le dans l'outil en tirant sur la gaine noire extérieure servant de raccord rapide.

NOTE: Un raccord rapide permet de connecter et de déconnecter rapidement des composants, sans outil. Il se verrouille et se déverrouille par un simple tirage.

1.



2.




3.



DÉPLACEMENT MANUEL (Processus)



1. Réglez l'outil en mode de rotation **ANTIHOAIRE** ou vers l'arrière, et placez-le sur la fonction **LO = basse vitesse**. Utilisez le trou situé à l'intérieur, du côté droit, et tournez dans le sens antihoraire (ou vers l'arrière) afin de déplacer le LINK jusqu'à ce que le dossier du siège soit près du volant. Arrêtez-vous lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour permettre au dossier du siège de pivoter au-delà du volant.

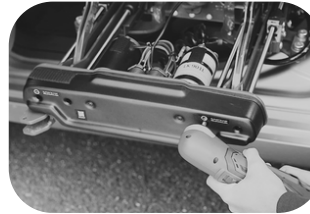

2. Pour le pivot, fixez la **douille articulée** à extrémité fendue à l'outil, puis insérez cette douille dans l'ouverture située à l'arrière du LINK et ajustez-la sur l'extrémité du moteur de pivot. Réglez l'outil sur **HI = haute vitesse** et sur un mouvement vers l'avant ou **HORAIRE**. Faites pivoter le siège jusqu'à ce que le dossier ait dépassé le volant. Ajuster l'inclinaison du dossier du siège peut faciliter cette étape.



DÉPLACEMENT MANUEL (Suite du processus)

LO

3. Réglez l'outil sur **LO = basse vitesse** et actionnez le moteur **TILT** en utilisant le trou intérieur du côté droit, en tournant l'outil avec l'embout hexagonal dans le sens **ANTIHOAIRE** ou vers l'arrière. Inclinez le siège vers le bas jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que le LINK.



LO

4. Réglez ensuite l'outil pour tourner dans le sens **HORAIRE** ou vers l'avant, puis utilisez le trou extérieur du côté gauche. Cette action permettra de faire avancer le siège à l'intérieur du véhicule. Déplacez le siège jusqu'à ce qu'il ait complètement dégagé le volant. Ajuster l'inclinaison du dossier du siège peut faciliter cette étape.



HI

5. Pour la dernière étape, réglez l'outil sur **HI = haute vitesse**, puis revenez au moteur **PIVOT** et effectuez la rotation jusqu'à ce que le siège soit parallèle et complètement à l'intérieur du véhicule.



DÉPLACEMENT MANUEL (Fonction Lift Up)

Si votre LINK est équipé de la fonction LIFT UP, deux (2) étapes supplémentaires doivent d'abord être effectuées :



DÉPLACEMENT MANUEL (Fonction Lift Up)



- i. Tout d'abord, réglez l'outil sur **LO = basse vitesse** et actionnez le moteur **TILT** en utilisant le trou intérieur du côté droit, en tournant dans le sens **HORAIRE** ou vers l'avant. Déplacez le LINK jusqu'à ce qu'il soit presque au sol, **sans toutefois toucher le sol**.



- ii. Ensuite, déplacez le siège à l'aide du trou extérieur du côté gauche, en tournant dans le sens **HORAIRE**, jusqu'à ce que le siège soit au niveau. Suivez ensuite simplement les **étapes 1 à 5**.



REMARQUE: Faites attention de ne pas débrancher ni pincer les fils lors du déplacement manuel du LINK. Une fois le problème résolu, n'oubliez pas de remettre les outils de secours dans votre véhicule.

Communiquez avec votre fournisseur de service pour faire vérifier l'appareil et effectuer les réparations nécessaires.



ENTRETIEN ET GARANTIE

ENTRETIEN RECOMMANDÉ

Afin de maintenir votre LINK sécuritaire, fiable et couvert par la garantie, un entretien annuel autorisé par un détaillant ADAPT SOLUTIONS est requis.

Cet entretien doit être effectué une fois tous les 1000 cycles complets (SORTIE et ENTRÉE) ou tous les 365 jours, selon la première éventualité. Il comprend une inspection complète de tous les composants mécaniques et électroniques, la lubrification des pièces clés, des ajustements du système ainsi qu'une vérification complète de la programmation. Cet entretien est essentiel pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et l'utilisation légale de votre équipement de mobilité.

Votre LINK est équipé d'une minuterie interne de 365 jours qui vous avisera automatiquement lorsque l'entretien est requis. Ces alertes comprennent :

- **Avertissement visuel :** Le voyant DEL sur la télécommande clignotera en alternance bleu et rouge pendant l'utilisation (voir page 4 [télécommande]).
- **Avertissement sonore :** L'unité émettra trois bips longs pendant le déplacement (voir page 3).

Ces indicateurs de sécurité sont conçus pour prévenir toute mauvaise utilisation ou défaillance. La réinitialisation de la minuterie est strictement réservée aux détaillants ADAPT SOLUTIONS autorisés, à la suite de l'entretien requis. Cette réinitialisation ne peut pas être effectuée par l'utilisateur.

Le non-respect de ces exigences d'entretien peut :

- Compromettre la sécurité et les performances du système.
- Annuler la couverture de la garantie.
- Augmenter le risque de dommages ou de défaillance.

Pour une tranquillité d'esprit continue, une conformité légale et une utilisation sécuritaire, planifiez l'entretien annuel de votre LINK auprès de votre fournisseur de service Adapt Solutions autorisé.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS



Adapt Solutions #1 Ltd. («Adapt Solutions») garantit à l'acheteur au détail original que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat ou de quatre mille cinq cents (4 500) cycles complets d'utilisation (sortie et rentrée) du véhicule dans lequel la base de siège est installée, selon la première éventualité. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'installation originale et n'est pas transférable.

Modalités de la couverture

Au cours de la première année de couverture, Adapt Solutions fournira les pièces de remplacement ainsi qu'un montant monétaire prédéterminé (déterminé à la seule discrétion d'Adapt Solutions) applicable aux coûts de réparation. La main-d'œuvre nécessaire pour corriger tout problème de pièces couvert par la présente garantie est également incluse durant cette période. Après la première année, la garantie couvre uniquement les pièces et les composants. La main-d'œuvre, le temps de diagnostic, le transport, les déplacements ainsi que tous les autres frais liés au service sont la seule responsabilité de l'acheteur.

Conditions de la garantie

Cette garantie s'applique seulement si le LINK:

- Est installé par un installateur Adapt Solutions autorisé.
- Est entretenu conformément aux recommandations d'Adapt Solutions.
- Est utilisé strictement conformément à l'usage prévu et dans les limites d'exploitation et l'environnement pour lesquels il a été conçu.

Le défaut d'effectuer l'entretien requis ou d'utiliser le produit conformément aux spécifications et aux instructions d'Adapt Solutions peut entraîner l'annulation totale ou partielle de la présente garantie. Une preuve d'utilisation et d'entretien appropriés peut être exigée afin de traiter une réclamation.

Toutes les inspections, les travaux de diagnostic, les réparations ou les remplacements effectués dans le cadre de cette garantie doivent être réalisés par un concessionnaire certifié Adapt Solutions ou par un fournisseur de services autorisé et approuvé par Adapt Solutions. Tout travail effectué par une autre partie peut entraîner l'annulation complète de la garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

(Suite)



Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie exclut la couverture pour :

- L'usure normale ou les défauts esthétiques n'affectant pas la fonctionnalité.
- Les dommages résultant d'une installation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, de modifications, d'une surcharge, d'une négligence ou d'un manque d'entretien.
- Les dommages causés par une collision, une obstruction ou une interférence avec des pièces du véhicule, des accessoires ou des objets externes.
- L'utilisation du produit en dehors de sa fonction prévue ou de ses limites physiques.
- Les réparations ou modifications effectuées par toute personne non autorisée par Adapt Solutions.
- Les coûts liés au démontage, au transport, à la réinstallation, à l'immobilisation du véhicule ou à l'utilisation d'un équipement de remplacement.

Recours exclusif

La seule obligation d'Adapt Solutions en vertu de la présente garantie consiste, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer le composant défectueux. Si la réparation ou le remplacement n'est pas possible, Adapt Solutions peut rembourser le prix d'achat original. Aucun autre recours n'est offert. Cette garantie est non transférable.

Limitation de responsabilité

En aucun cas Adapt Solutions ne pourra être tenue responsable de dommages indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, incluant notamment la perte de temps, la perte d'utilisation, les inconvénients, les pertes commerciales ou tout autre dommage, qu'ils découlent d'une rupture de contrat, d'une violation de garantie, d'un délit civil (y compris la négligence), de la responsabilité stricte, de la responsabilité du fait des produits ou de toute autre cause, même si Adapt Solutions a été avisée de la possibilité de tels dommages. Cette exclusion s'applique indépendamment de toute défaillance de l'objet essentiel de tout recours limité.

Exclusion des garanties implicites

Dans toute la mesure permise par la loi, toutes les garanties implicites, incluant notamment les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées dans leur durée à celle de la présente garantie écrite et sont assujetties aux mêmes limitations et exclusions.

POUR OBTENIR DES PIÈCES GARANTIES OU UN REMBOURSEMENT

Pour obtenir un service sous garantie ou des pièces de remplacement en vertu de la présente garantie limitée, vous devez suivre les procédures suivantes :

1. Aviser le concessionnaire autorisé (ou Adapt Solutions afin d'obtenir de l'aide pour en trouver un) du problème présumé dans les dix (10) jours suivant la découverte du problème.
2. Si, après inspection par du personnel qualifié, il est confirmé que le problème résulte d'un défaut de matériaux ou de fabrication, Adapt Solutions assumera le coût de la pièce de remplacement ainsi que les frais d'expédition (service terrestre) vers l'acheteur aux États-Unis continentaux et au Canada.
3. Si le problème n'est pas couvert par la garantie, y compris, sans s'y limiter, les problèmes causés par une mauvaise utilisation, des dommages physiques, des modifications, une installation inadéquate ou l'usure normale, tous les coûts liés aux pièces associées et au transport seront à la charge de l'acheteur.

POUR OBTENIR DES PIÈCES GARANTIES OU UN REMBOURSEMENT (Suite)

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

- Les frais de main-d'œuvre et de transport liés au service sous garantie ne sont pas couverts, sauf indication contraire expresse d'Adapt Solutions.
- Si vous n'avez pas de concessionnaire habituel, vous pouvez utiliser notre localisateur de détaillants afin de trouver l'emplacement autorisé le plus près de chez vous : www.adaptsolutions.com/dealer
- Si les réparations sous garantie ne peuvent être complétées dans un délai de trente (30) jours, ou si deux (2) tentatives de réparation ou plus ont été infructueuses, vous devez en aviser Adapt Solutions par écrit afin que nous puissions vous assister davantage conformément aux modalités de la présente garantie.

MENTIONS LÉGALES

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État ou la province.

Adapt Solutions n'autorise aucune personne ni entité à étendre ou à modifier la portée ou la durée de la présente garantie. Toute promesse de ce type n'est pas valide à moins d'être confirmée par écrit par Adapt Solutions.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant cette garantie limitée, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 1-866-641-0419, par courriel à info@adaptsolutions.com, ou par écrit à l'adresse suivante :

Adapt Solutions - Département de la garantie
145, rue Damase-Breton
Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada
G0S 2W0

Enregistrement de la garantie

Adapt Solutions #1 Ltée, située à Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada, garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Ce produit doit être installé par un fournisseur agréé et utilisé correctement pour être couvert par la garantie. Cette garantie est limitée à l'acheteur d'origine et ne couvre pas les défauts du véhicule. L'enregistrement de la garantie doit être rempli et renvoyé dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure anormale ou les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou si le produit a été modifié de quelque manière que ce soit. Les pièces défectueuses doivent être retournées par un fournisseur agréé, qui aura reçu au préalable une autorisation de retour de la part d'Adapt Solutions #1 Ltée. Toutes les pièces sous garantie doivent être envoyées à Adapt Solutions #1 Ltée en port payé. Les pièces seront remplacées ou réparées à la discrétion d'Adapt Solutions #1 Ltée.

Date d'installation : _____

Fournisseur : _____

Signature du fournisseur : _____

À CONSERVER DANS VOS DOSSIERS

(Apposez le numéro de série ici)



Scannez le code QR pour
vous inscrire en ligne

1-866-641-0419 | tech@adaptsolutions.com

Manuel de l'utilisateur



Rev. 02

Septembre 2025



145, rue Damase-Breton, Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada, G0S 2W0

www.adaptsolutions.com

Téléphone : 1.866.641.0419

Courriel : info@adaptsolutions.com

Toutes les illustrations, descriptions et spécifications contenues dans ce manuel reflètent les informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Adapt Solutions #1LTÉE se réserve le droit de modifier tout détail à tout moment sans préavis.