


MANUEL DE L'UTILISATEUR

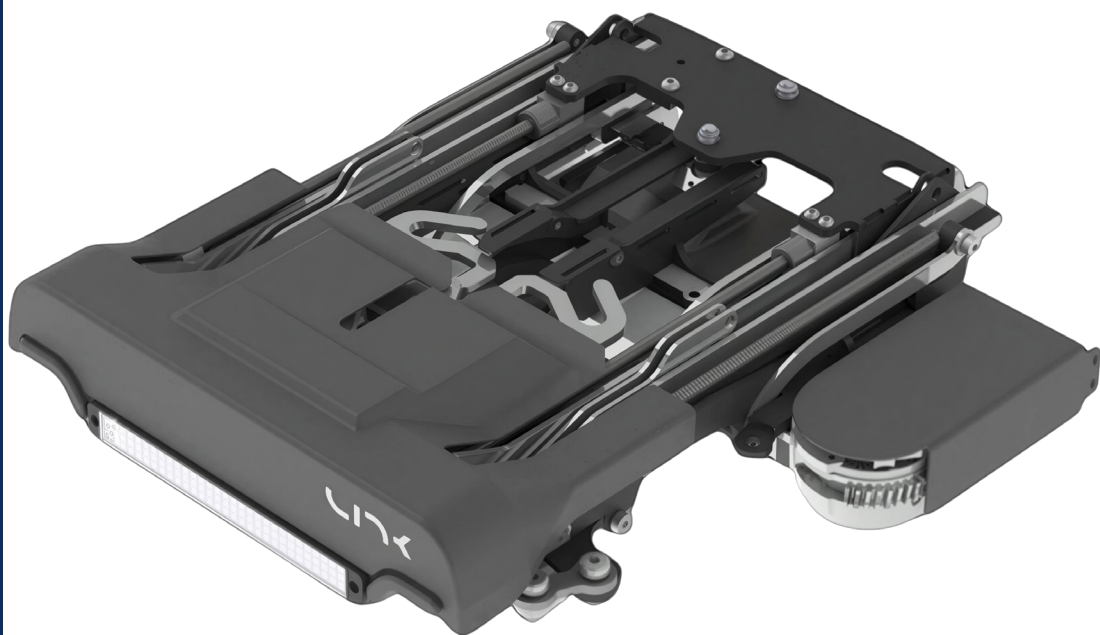

BIENVENUE

Ce produit a été conçu pour faciliter un accès sécuritaire à votre véhicule, tout en préservant le confort, l'esthétique et les dispositifs de sécurité du siège d'origine de votre véhicule.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel d'utilisation, y compris toutes les informations de sécurité et les avertissements, avant d'utiliser le LINK 2.0. Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement en toute sécurité, les indicateurs d'état du système, les voyants, les signaux sonores d'alerte, l'entretien et l'utilisation adéquate du produit. Le système de secours manuel ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. Le respect de ces instructions favorisera des performances fiables et une durabilité à long terme.



Veuillez conserver ce manuel dans le véhicule pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement, l'entretien ou le service après-vente de votre LINK 2.0, veuillez contacter votre fournisseur de services certifié Adapt Solutions.

TABLE DES MATIÈRES

Informations importantes relatives à la sécurité.....	3
Commandes et fonctionnement.....	6
Guide de démarrage rapide.....	8
Lift Up Feature.....	10
Application mobile MyLINK.....	11
Entretien et service.....	12
Alertes et avertissements.....	13
Dépannage.....	14
Système de secours manuel.....	15
Garantie.....	17
Accord entre l'utilisateur et le fournisseur de services.....	19
Informations sur le produit.....	20

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

IMPORTANT

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'appareil et/ou le véhicule.

UTILISATION ET ENTRETIEN APPROPRIÉS

- Le LINK doit être utilisé exclusivement conformément à son usage défini et en respectant toutes les instructions figurant dans le présent manuel.
- Le LINK doit être inspecté et entretenu correctement, conformément aux spécifications du présent manuel.
- L'entretien requis doit être effectué tous les 1 000 cycles ou tous les 365 jours, selon la première échéance.
- Le non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien appropriées pourrait entraîner un fonctionnement dangereux et pourrait causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
- Cessez d'utiliser le LINK si vous constatez un fonctionnement anormal, un bruit inhabituel ou des dommages.

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE: 350 LBS

Cela inclut l'utilisateur et tous les objets placés sur le siège.

- Un seul utilisateur assis.
- Ne transportez pas de passagers supplémentaires et ne tenez pas d'enfant ou d'animal de compagnie sur vos genoux.

PIÈCES EN MOUVEMENT, RISQUE DE PINCEMENT ET D'ÉCRASEMENT

Le LINK est un système motorisé qui se déplace avec puissance.

- Éloignez vos mains, vos bras, vos jambes, vos vêtements et tout objet non fixé de toutes les pièces en mouvement.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal de compagnie ne se trouve à proximité pendant le fonctionnement.
- Ne placez jamais aucune partie de votre corps sous, derrière ou à proximité du mécanisme.
- Restez correctement assis à tout moment pendant le mouvement.
- Ne vous levez pas, ne vous penchez pas et ne changez pas de position pendant que le LINK est en marche.
- N'essayez jamais d'arrêter ou d'entraver le mouvement.
- Tout contact avec les pièces en mouvement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

CONDITIONS D'OPÉRATION SÉCURITAIRES

- N'utilisez ce dispositif que lorsque le véhicule est garé sur une surface plane et horizontale.
- Assurez-vous que la porte est complètement ouverte et que la trajectoire de déplacement est dégagée.
- Assurez-vous que le LINK est entièrement à l'intérieur du véhicule avant tout déplacement de celui-ci.
- Interrompez immédiatement le fonctionnement si le siège entre en contact avec un objet ou le sol.
- Éloignez votre tête, vos bras et vos jambes de la structure du véhicule pendant le déplacement.
- Relâchez la commande à tout moment pour arrêter immédiatement le déplacement.

CESSEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION SI

- Des bruits inhabituels, des vibrations ou des mouvements irréguliers sont constatés.
- L'appareil présente des dommages visibles.
- Le système ne répond pas ou se comporte de manière inattendue.
- Tout voyant d'alerte ou signal sonore indiquant un problème nécessitant une intervention.

Cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un fournisseur de services certifié Adapt Solutions.

APRÈS UN ACCIDENT OU UN CHOC

- N'utilisez pas le LINK après une collision ou un choc.
- L'appareil doit être inspecté et approuvé par Adapt Solutions avant toute réutilisation.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un fonctionnement dangereux et augmenter le risque de blessure.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

UTILISATION, ENTRETIEN ET MODIFICATION AUTORISÉS

- Le LINK doit être installé, inspecté, entretenu et réparé par un fournisseur de services certifié Adapt Solutions.
- Ne modifiez pas, n'altérez pas, ne réparez pas et n'installez pas de composants non homologués.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne marchez pas, ne vous tenez pas debout et n'exercez aucune pression sur la base ou les couvercles du LINK.
- N'utilisez pas le LINK si les opérations d'entretien requises n'ont pas été effectuées.

Une utilisation inappropriée, une intervention non autorisée, une modification ou un manque d'entretien peuvent entraîner un fonctionnement dangereux, une défaillance de l'équipement, des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENTS SONORES ET ALERTES

Le LINK est équipé d'alertes sonores et visuelles permettant d'indiquer l'état du système.

- Les signaux sonores et les alertes peuvent indiquer un dysfonctionnement ou une situation dangereuse.
- Ne négligez jamais ces avertissements.

Consultez la liste complète des avertissements à la page 13.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

En utilisant le LINK, vous reconnaissez que :

- Vous avez lu et compris l'ensemble des consignes de sécurité et des avertissements.
- Vous n'utiliserez le produit que conformément à l'usage prévu.
- Vous assurerez l'entretien du produit comme il se doit.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un fonctionnement dangereux, des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

COMMANDES ET FONCTIONNEMENT

- 1.ACTIVATION 2.ENTRER (IN) 3.SORTIR (OUT)
4.AVANCER 5.RECULER
6.INCLINER VERS LE HAUT 7.INCLINER VERS LE BAS

COMMANDES DE MOUVEMENT DE BASE

- Appuyez sur *OUT* → Le siège sort du véhicule et s'abaisse
- Appuyez sur *IN* → Le siège retourne à l'intérieur du véhicule
- Relâchez le bouton à tout moment pour arrêter le mouvement

AJUSTEMENT DU SIÈGE

Le LINK vous permet de régler la position de votre siège :

- Avancer le siège
- Reculer le siège
- Incliner le siège vers le haut
- Incliner le siège vers le bas

CONDITION IMPORTANTE

Les réglages du siège ne sont disponibles que lorsque :

- Le LINK se trouve entièrement à l'intérieur du véhicule.
- Le cycle de mouvement est terminé.
- Si les réglages ne fonctionnent pas : **maintenez la touche *IN* enfoncée jusqu'à ce que tout mouvement cesse ; les réglages seront alors disponibles.**

UTILISATION DE L'APPLICATION MOBILE

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au LINK. Une perte de connexion peut interrompre le mouvement. Si le système présente un comportement inattendu, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez la section «Avertissements».

VEUILLEZ NOTER: Le voyant situé à l'avant du LINK clignotera trois fois pour confirmer que le LINK est complètement retourné dans le véhicule.



INDICATEURS VISUELS

Que signifient ces voyants lumineux ?

- **BLEU:** Fonctionnement normal, système prêt
- **JAUNE:** Mode économie d'énergie (voir page 13)
- **ROUGE:** Problème détecté
- **VERT:** Pas de réponse, problème d'alimentation 12 volts
- **BLEU/ROUGE:** Entretien requis (voir page 12)

COMPORTEMENT DE LA LUMIÈRE D.E.L.

- Le voyant s'allume lorsque la commande est active.
- Le voyant clignote pendant le mouvement.
- Le voyant peut clignoter rapidement pour signaler une commande non valide.

MÉMOIRE DE POSITION AUTOMATIQUE

Le LINK mémorise automatiquement la position de siège que vous préférez. Une fois réglée, votre position est enregistrée. À chaque fois que le siège retourne à l'intérieur du véhicule, il revient automatiquement à cette position.

COMPORTEMENT DU SYSTÈME EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Le LINK intègre des dispositifs de protection destinés à empêcher tout fonctionnement dangereux. Le système effectuera automatiquement les opérations suivantes :

- Empêcher tout déplacement vers l'extérieur lorsque la porte est fermée.
- Désactiver les réglages lorsque le siège est en mouvement.
- Arrêter le mouvement si un risque ou un obstacle est détecté.
- Si une commande n'est pas acceptée, vérifier l'état du système et réessayer.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Le LINK peut être commandé soit à l'aide de la télécommande, soit via l'application mobile MyLINK. Les deux modes de commande fonctionnent de la même manière.

AVANT DE COMMENCER

Avant d'utiliser le LINK:

- Enclenchez le frein à main.
- Assurez-vous que votre porte est entièrement ouverte.
- Assurez-vous qu'il n'y a ni personnes ni objets à proximité du siège.

POUR ENTRER DANS LE VÉHICULE

1. Activez les commandes (télécommande ou application mobile).
2. Appuyez et maintenez le bouton *OUT* (sortir)
 - Le siège se déplacera à l'extérieur du véhicule et s'abaissera.
3. Relâchez le bouton lorsque le siège atteint une position de transfert confortable.
4. Asseyez-vous sur le siège d'un mouvement fluide et maîtrisé.
5. Appuyez et maintenez le bouton *IN* (entrer):
 - Le siège retournera à l'intérieur de votre véhicule.
6. Une fois le mouvement complété:
 - Fermez la porte.
 - Ajustez votre siège au besoin.

POUR SORTIR DU VÉHICULE

1. Ouvrez la porte de votre véhicule.
2. Activez les commandes (télécommande ou application mobile).
3. Appuyez et maintenez le bouton *OUT* (sortir):
 - Le siège se déplacera à l'extérieur du véhicule et s'abaissera.
4. Relâchez le bouton lorsque le siège atteint une position de transfert confortable.
5. Transférez-vous hors de votre siège:
 - Appuyez et maintenez le bouton *IN* (entrer).
 - Rentrez complètement le siège à l'intérieur du véhicule.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

INFORMATION IMPORTANTE À SAVOIR LORS DE L'OPÉRATION

- Vous pouvez relâcher le bouton à tout moment pour arrêter le mouvement.
- Restez toujours bien assis pendant le mouvement.
- Éloignez vos bras, vos jambes et vos vêtements des pièces en mouvement.
- Surveillez la position de vos jambes tout au long du mouvement.

AJUSTEMENT DU SIÈGE

Les réglages du siège (avancement, recul, inclinaison) ne sont disponibles que lorsque :

- Le LINK se trouve entièrement à l'intérieur du véhicule.
- Le cycle de mouvement est terminé.

Si les boutons de réglage ne répondent pas :

- Appuyez sur le bouton *IN* (entrer) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tout mouvement cesse.
- Une fois cette opération terminée, les réglages seront disponibles.

RAPPELS IMPORTANTS

- N'actionnez jamais le LINK lorsque le véhicule est en mouvement.
- N'actionnez jamais le mouvement vers l'extérieur lorsque la porte est fermée.
- Assurez-vous toujours que le siège soit complètement rentré avant de prendre la route.

FONCTION LIFT UP

Le LINK peut être programmé avec une fonction *Lift Up* en option. Cette fonction peut aider l'utilisateur à se lever une fois sorti du véhicule, ou faciliter le réglage de l'inclinaison du siège pour faciliter le transfert.

Cette fonction est configurée par un fournisseur de services certifié Adapt Solutions.

Elle ne peut être ni ajoutée, ni supprimée, ni modifiée par l'utilisateur.

Si votre véhicule est équipé de cette fonction, demandez à votre concessionnaire de vous en faire une démonstration.



APPLICATION MOBILE MYLINK

L'application MyLINK est conçue exclusivement pour le système LINK 2.0 et constitue un élément essentiel de l'expérience utilisateur globale. Elle permet d'accéder aux informations du système, de surveiller son état, de recevoir des rappels d'entretien et de bénéficier de fonctionnalités intelligentes avancées destinées à garantir le bon fonctionnement de votre LINK 2.0 au fil du temps.

Pour profiter pleinement des fonctions intelligentes et des fonctionnalités connectées du LINK 2.0, le système doit être appairé à un smartphone compatible à l'aide de l'application MyLINK. Le simple téléchargement de l'application ne suffit pas à activer les fonctionnalités du LINK 2.0. La configuration initiale et l'appairage Bluetooth doivent être effectués par votre fournisseur de services certifié Adapt Solutions lors de l'installation ou de la livraison du véhicule.

Une fois connectée, l'application MyLINK permet d'accéder aux diagnostics avancés, à la surveillance du système et aux fonctions logicielles intégrées à la plateforme LINK 2.0. Sans connexion active à l'application, certaines fonctionnalités intelligentes et connectées du LINK 2.0 peuvent ne pas être disponibles.

Téléchargez l'application MyLINK en scannant le code QR ci-dessous ou en recherchant « MyLINK » sur l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter et effectuer la configuration.



Pour obtenir une assistance supplémentaire, consulter le mode d'emploi de l'application ou connaître les dernières mises à jour, rendez-vous sur www.adaptsolutions.com ou contactez votre fournisseur de services certifié Adapt Solutions.

ENTRETIEN ET SERVICE

ENTRETIEN REQUIS

Un entretien adéquat est nécessaire pour garantir un fonctionnement sûr et fiable du LINK. Le non-respect des consignes d'entretien peut entraîner un fonctionnement dangereux, endommager l'équipement ou causer des blessures graves, et peut entraîner l'annulation de la garantie.

INTERVALLE D'ENTRETIEN REQUIS

- Entretien tous les **1 000 cycles** complets ou tous les **365 jours**, selon la première occurrence.
- Cet entretien doit être effectué par un fournisseur certifié Adapt Solutions.

CE QUI EST INCLUS DANS L'ENTRETIEN

- Inspection des composants mécaniques afin de détecter toute trace d'usure, de dommage, de pièce desserrée ou mal fixée, ou tout dysfonctionnement.
- Inspection des composants électriques et des raccordements.
- Remplacement des composants usés, endommagés, défectueux ou présentant un risque pour la sécurité, identifiés lors des inspections de maintenance.
- Lubrification des pièces mobiles.
- Réglages du système et vérification de son bon fonctionnement.
- Mises à jour logicielles et vérification du bon fonctionnement des logiciels.

ALERTES D'ENTRETIEN

- Le voyant D.E.L. clignote en rouge et bleu (voir p. 7).
- Des bips répétés signalent qu'il est temps de procéder à l'entretien (voir p. 13).

SI L'ENTRETIEN EST EN RETARD

- Les performances du système peuvent être réduites.
- Les composants peuvent s'user prématurément.
- Le fonctionnement peut devenir dangereux.
- Une utilisation prolongée sans l'entretien requis peut entraîner un fonctionnement dangereux et doit être évitée.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SERVICE

- L'entretien doit être effectué exclusivement par un fournisseur de services certifié Adapt Solutions.
- L'utilisateur ne doit en aucun cas réinitialiser le système ni intervenir sur celui-ci.
- Une attestation d'entretien peut être exigée pour toute demande de garantie.

ALERTES ET AVERTISSEMENTS

Le LINK utilise des signaux sonores et des indicateurs visuels pour communiquer des informations importantes concernant le système. Si vous ne savez pas ce que signifie un signal sonore ou un voyant lumineux, consultez les informations ci-dessous.



ALERTES SONORES

Que signifie ce signal sonore et comment réagir ?

Tonalité	Signification	Que faire
3 bips ascendants	Le système démarre	Contactez votre fournisseur si survient de façon inattendue ou répétée.
1 bip long et aigu	Protection contre les surcharges	Cessez d'utiliser le LINK et faites-le inspecter.
Bips alternés	Surcharge du moteur	Cessez l'utilisation et contactez votre fournisseur.
2 bips courts et aigus	Obstruction du pivot	Vérifiez qu'aucun objet n'entrave le LINK. Si dommages visibles, cessez l'utilisation et contactez votre fournisseur.
3 long bips	Rappel d'entretien	Prenez rendez-vous auprès de votre fournisseur de services pour un entretien.
4 bips graves	Commande refusée en prévention	Vérifiez l'état de l'appareil. Si persiste, cessez de l'utiliser et contactez votre fournisseur.



RAPPEL DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Si le LINK présente un dysfonctionnement, émet des bruits inhabituels, s'arrête de manière inattendue ou affiche des messages d'avertissement répétés, cessez d'utiliser le système et contactez votre fournisseur de services certifié Adapt Solutions.



MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si la batterie 12 V du véhicule est débranchée ou complètement déchargée, le LINK passe en mode de puissance réduite par mesure de sécurité afin de protéger le véhicule et l'appareil. Il doit effectuer un cycle complet avant de pouvoir reprendre son fonctionnement normal. Ce comportement est normal et contribue à garantir la fiabilité à long terme de l'appareil.



En cas de doute, cessez d'utiliser le LINK et contactez votre fournisseur Adapt Solutions.

DÉPANNAGE

Problèmes courants et mesures recommandées.

Problème	Vérifier	Action
Le siège cesse de bouger	- Vérifiez qu'aucun objet n'entrave le mouvement. - Assurez-vous que la porte est ouverte et que le passage est dégagé.	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur.
L'ajustement du siège ne fonctionne pas	Vérifiez que le siège est bien rentré à l'intérieur du véhicule et que son déplacement est terminé.	Appuyez sur la touche « IN » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que tout mouvement cesse, puis réessayez.
L'application ne répond pas	- Vérifiez la connexion du téléphone et le Bluetooth. - Vérifiez l'alimentation du LINK (batterie du véhicule).	Redémarrez l'application. Si elle ne répond toujours pas, contactez votre fournisseur.
Les commandes ne répondent pas	Vérifiez si la télécommande est activée et si le voyant est allumé.	Appuyez à nouveau sur le bouton « POWER ». Si le voyant indique un dysfonctionnement, contactez votre fournisseur.
Le signal sonore d'alerte se répète	Vérifiez s'il y a des obstructions visibles ou des anomalies.	Cessez d'utiliser LINK et contactez votre fournisseur.
Rappel d'entretien actif	L'entretien du LINK est à faire.	Prenez rendez-vous pour un entretien auprès de votre fournisseur de services certifié Adapt Solutions.

SYSTÈME DE SECOURS MANUEL

À UTILISER UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE

Le système de secours est uniquement conçu pour ramener le LINK en toute sécurité à l'intérieur du véhicule lorsque son fonctionnement normal n'est pas possible. Il ne doit être utilisé que si le LINK ne répond pas à la télécommande ou à l'application MyLINK et que le siège est bloqué à l'extérieur du véhicule.

N'utilisez pas cette procédure si le siège est déjà entièrement à l'intérieur du véhicule. Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Cette procédure nécessite un effort physique et ne doit en aucun cas être effectuée avec une personne ou un animal de compagnie assis sur le siège.

AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME DE SECOURS :



- **IMPORTANT:** Débranchez l'alimentation 12 V du LINK avant de commencer.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal de compagnie ne se trouve à proximité de l'appareil.
- Retirez tout objet susceptible d'entraver son fonctionnement.
- Assurez-vous que personne n'est assis sur l'appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Veillez à ce que vos mains, vos doigts et toute autre partie de votre corps ne se trouvent pas à proximité des éléments en mouvement.
- Déplacez le siège lentement et avec précaution.
- Arrêtez-vous immédiatement si vous ressentez une résistance, si vous remarquez un mouvement anormal ou si vous entendez un bruit inhabituel.
- Cette procédure a pour seul objectif de replacer le siège entièrement à l'intérieur du véhicule.

OUTILS NÉCESSAIRES

Utilisez la trousse de secours fournie avec le véhicule, qui comprend : un outil électrique, un adaptateur et des câbles, ainsi que des embouts et des clés à douille.

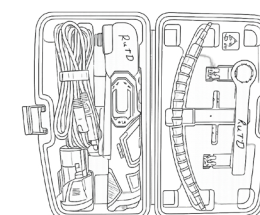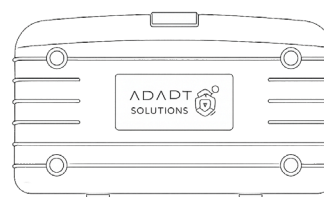

SYSTÈME DE SECOURS MANUEL

APERÇU SIMPLIFIÉ DU PROCESSUS

La séquence exacte des mouvements peut varier en fonction de la position du LINK. En général, la procédure comprend les étapes suivantes :

1. Régler l'inclinaison du siège pour créer un espace libre.
2. Faire pivoter le siège vers l'intérieur.
3. Reculer le siège à l'intérieur du véhicule.
4. Effectuer le positionnement final jusqu'à ce que le LINK soit entièrement à l'intérieur du véhicule.

Cette section est destinée uniquement à servir de référence en cas d'urgence. Pour connaître l'emplacement détaillé des moteurs, la configuration des outils et les instructions étape par étape, scannez le code QR ci-dessous pour accéder à la vidéo ou au guide de référence.

APRÈS L'INTERVENTION D'URGENCE

Une fois que le LINK est entièrement retourné à l'intérieur du véhicule :

- N'essayez pas d'utiliser à nouveau le LINK.
- Contactez immédiatement votre distributeur Adapt Solutions agréé.
- Le LINK doit être inspecté et réinitialisé avant de pouvoir fonctionner à nouveau normalement.



Scannez le code QR pour visionner comment effectuer le système de secours manuel

ATTENTION

N'utilisez pas le LINK après une opération de secours manuel. Contactez votre fournisseur de services certifié Adapt Solutions pour une inspection, un diagnostic et pour les réparations nécessaires avant que vous puissiez réutiliser votre LINK normalement.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Adapt Solutions #1 Ltée. (« Adapt Solutions ») garantit à l'acheteur initial au détail que le LINK est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de **trois (3) ans** à compter de la date d'achat ou jusqu'à ce que le LINK ait effectué **quatre mille cinq cents (4 500) cycles** complets, la première de ces deux échéances étant retenue. Un cycle complet du LINK correspond à un mouvement complet vers l'extérieur puis vers l'intérieur du LINK. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'installation d'origine et n'est pas transférable. Cette garantie limitée ne restreint en rien les droits dont l'acheteur peut bénéficier en vertu des lois applicables en matière de protection des consommateurs.

CONDITIONS DE COUVERTURE

Au cours de la première année de couverture, si un défaut de matériau ou de fabrication est confirmé par Adapt Solutions ou par un fournisseur de services certifié Adapt Solutions, Adapt Solutions fournira les pièces de rechange ainsi qu'une participation financière prédéterminée pour la main-d'œuvre, conformément aux conditions de la garantie d'Adapt Solutions relatives à la main-d'œuvre. Au-delà de la première année, cette garantie limitée couvre uniquement les pièces de rechange. Sauf disposition contraire de la législation en vigueur, l'ensemble des frais de main-d'œuvre, de diagnostic, de transport, de déplacement et autres frais liés à l'intervention après la première année sont à la charge de l'acheteur.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Le LINK doit être installé, inspecté, entretenu et réparé par un fournisseur de services certifié Adapt Solutions ou par un prestataire de services agréé par Adapt Solutions, en utilisant exclusivement des pièces d'origine Adapt Solutions ou des pièces approuvées par Adapt Solutions.
- Le LINK doit être entretenu conformément aux exigences d'Adapt Solutions, notamment en respectant l'entretien obligatoire tous les **1 000 cycles** ou tous les **365 jours**, selon la première échéance.
- Le LINK doit être utilisé uniquement conformément à l'usage prévu, dans les limites de fonctionnement pour lesquelles il a été conçu, et en respectant toutes les instructions, mises en garde et consignes de sécurité figurant dans le présent manuel.
- Le LINK ne doit pas faire l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un fonctionnement inapproprié, de conditions anormales, ni d'une utilisation prolongée après la constatation d'un dysfonctionnement, d'un mouvement irrégulier ou d'un bruit inhabituel.
- Si le LINK a été impliqué dans un accident, une collision, un choc ou a subi une force externe, il doit faire l'objet d'une inspection complète et être validé par Adapt Solutions avant toute nouvelle utilisation.
- Le non-respect de ces conditions peut entraîner le refus de la couverture de garantie dans la mesure autorisée par la législation applicable.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- L'usure normale ou les défauts esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement.
- Les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une surcharge, d'une négligence ou d'un manque d'entretien requis.
- Les dommages causés par une obstruction, une interférence ou un contact avec des composants du véhicule, des accessoires, le sol ou des objets extérieurs.
- Les dommages causés par une utilisation du LINK en dehors de l'usage prévu, de l'environnement prévu ou des limites physiques du produit.
- Les dommages causés par une réparation, une modification ou une intervention non autorisée.
- Les dommages consécutifs à un accident, une collision, un choc externe ou une force extérieure, sauf si le LINK a été inspecté et approuvé par Adapt Solutions avant toute nouvelle utilisation.
- Les frais liés au démontage, au transport, à la réinstallation, aux temps d'arrêt, au matériel de remplacement ou à la perte d'usage, sauf disposition contraire de la législation applicable.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

(Suite)

RECOURS EXCLUSIF

Dans toute la mesure permise par la loi, Adapt Solutions peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer le composant défectueux.

Si la réparation ou le remplacement n'est pas commercialement viable ou ne peut être effectué dans un délai raisonnable, Adapt Solutions peut choisir de rembourser le prix d'achat initial payé pour le produit LINK.

Les recours décrits dans la présente garantie limitée constituent les seuls et uniques recours disponibles au titre de cette garantie, sous réserve des droits dont l'acheteur pourrait bénéficier en vertu de la législation applicable.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans toute la mesure permise par la loi, Adapt Solutions ne saurait être tenue responsable des dommages indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, y compris, sans s'y limiter, la perte de temps, la perte d'usage, les désagréments, les pertes commerciales ou les frais liés à l'acquisition d'équipements de remplacement, quel que soit le fondement juridique invoqué pour réclamer ces dommages-intérêts.

Certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs ; par conséquent, la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous.

SERVICE APRÈS-VENTE SOUS GARANTIE

1. Contactez votre fournisseur de services certifié Adapt Solutions pour ouvrir une demande de garantie.
2. Signalez tout défaut présumé dès que possible après sa découverte, et au plus tard dans les dix (10) jours suivant sa découverte, lorsque la loi le permet.
3. Fournissez, sur demande, la preuve d'achat, l'identification du produit, les informations d'installation, l'historique d'entretien, le nombre de cycles et une description du défaut présumé.
4. Ne renvoyez aucun produit ou composant sans y avoir été invité par Adapt Solutions ou un fournisseur de services certifié Adapt Solutions.
5. Les pièces défectueuses peuvent devoir être renvoyées en port payé, conformément aux instructions, sauf disposition contraire de la législation applicable.
6. Si la réclamation n'est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les frais associés à l'inspection, au diagnostic, à la main-d'œuvre, au transport, aux déplacements, à la réparation et à l'entretien restent à la charge de l'acheteur.

Si vous ne connaissez pas de fournisseur de services certifié Adapt Solutions, utilisez l'outil de recherche de revendeurs pour trouver le distributeur agréé le plus proche : www.adaptsolutions.com/fournisseur.

MENTION LÉGALE

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État, la province ou le territoire.

Adapt Solutions n'autorise aucune personne physique ou morale à étendre, modifier ou altérer la portée ou la durée de la présente garantie limitée. Toute promesse, déclaration ou modification de ce type n'est valable que si elle est confirmée par écrit par Adapt Solutions.

Pour plus d'informations concernant la présente garantie limitée, veuillez contacter Adapt Solutions par téléphone au **1-866-641-0419** ou par courriel à info@adaptsolutions.com.

ACCORD ENTRE L'UTILISATEUR ET LE FOURNISSEUR DE SERVICES

Cette page est destinée au contrôle des livraisons et à la tenue des registres.

ACCORD DE L'UTILISATEUR

En signant ci-dessous, le client reconnaît que :

- Le fonctionnement du LINK a été vérifié.
- Le manuel d'utilisation a été fourni.
- Les consignes de sécurité, les instructions d'utilisation et les exigences d'entretien ont été passées en revue.
- Le LINK doit être utilisé exclusivement conformément à l'usage prévu et dans les limites de fonctionnement pour lesquelles il a été conçu.
- Les opérations d'entretien et les inspections requises doivent être effectuées conformément aux indications du présent manuel.
- Le LINK ne doit pas être utilisé en cas de fonctionnement anormal, de dommages ou de situation présentant un risque pour la sécurité.
- Tout accident, choc ou événement inhabituel nécessite une inspection par un fournisseur de services certifié Adapt Solutions avant toute utilisation ultérieure.

Le non-respect des instructions, des avertissements et des consignes d'entretien figurant dans le présent manuel peut entraîner un fonctionnement dangereux, des blessures graves, voire la mort, et peut avoir une incidence sur la couverture de la garantie dans la mesure autorisée par la législation en vigueur.

CONFIRMATION DE LIVRAISON PAR LE FOURNISSEUR

Nom du
fournisseur

Nom du client

Véhicule

Date de livraison

Signature client

Représentant du
fournisseur

- | | |
|--|---|
| ☐ Démonstration du fonctionnement | ☐ Révision des consignes de sécurité |
| ☐ Révision des conditions de garantie | ☐ Révision des besoins en matière de maintenance |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de
série

Identifiant
Bluetooth

Nom du LINK

Fournisseur

Date
d'installation



MANUEL DE L'UTILISATEUR



145, rue Damase-Breton, Saint-Lambert-de-Lauzon,
Québec, Canada, G0S 2W0

www.adaptsolutions.com

Téléphone: 1-866-641-0419

Courriel: info@adaptsolutions.com

Toutes les illustrations, descriptions et caractéristiques techniques figurant dans ce manuel reflètent les informations les plus récentes disponibles sur le produit au moment de la publication. Adapt Solutions #1LTD se réserve le droit de modifier tout détail à tout moment et sans préavis.

